

MEDICARINE - dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru.

MEDICARINE je deklarován jako BIOCID.

Výhody pro uživatele:

- je vysoce účinný a rychlý
- vyniká jednoduchým dávkováním
- je ekonomický

Spektrum účinnosti: baktericidní, plně virucidní), fungicidní, tuberkulocidní, sporicidní

Složení: účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%, 1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru

Návod k použití:

Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Plochy omyjte a nechte uschnout, předměty ponořte do roztoku, po uplynutí doby expozice opláchněte čistou vodou. Plochy silně zatížené biologickou zátěží předem očistěte a zbavte organických látek. Uživatelský komfort je možno zvýšit použitím vody o teplotě do 35 stupňů Celsia. Pro zvýšení čistící účinnosti pracovních roztoků dezinfekčního prostředku Medicarine doporučujeme kombinaci s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čistícími prostředky. Nemíchejte s kyselými čistícími prostředky.

Oblast použití		Dávkování	Doba působení
Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, veterinárních, potravinářských, stravovacích, ubytovacích zařízeních apod.		1tbl/5l	15 min
Dezinfekce sifonů roztokem Dezinfekce sifonů bez přípravy roztoku - tabletu položit na mřížku odpadu a zalít malým množstvím roztoku		1 tableta / 1,5 l vody 1 tableta	30 min 30 min
Dezinfekce koupacích van		2 tablety / 10 l vody	5 min
Dezinfekce nádobí-dle úrovně biologického znečištění		2-4 tablety/10 l vody	15 min
A(B)(V) /Clean A(B)T(V) ABTM(V) + Clostridium diff./Dirty ABTMV + Clostridium diff.:/Dirty (plísně EN 13697) ABCTMV		2tbl/10l 2tbl/10l 1tbl/1,5l 2tbl/1,5l 5tbl/1,5l	15 min 30 min 15 min 15 min 15 min
Baktericidní účinek	S. aureus, E. coli, E. hireae, Ps. aeruginosa	EN 13727: 1tbl/7,5l vody EN 1276: 1 tbl/5l vody EN 13697: 1tbl/1,5l vody	1 min 5 min 5 min
Fungicidní (kvasinky)	C. albicans	EN 13624: 1tbl/7,5l vody EN 1650: 1 tbl/5l vody EN 13697: 1tbl/15l vody	1 min 15 min 5 min
Fungicidní (plísně)		EN 1650: 2tbl/5l vody EN 13624: 1tbl/3l vody EN 13697: 1tbl/1,5l	15 min 30 min 15 min
TBC	M. terrae	DGHM : 1tbl/10l	30 min
TBC	M. terrae	EN 14348: 1tbl/3l	15 min
Mykobakterie	M. avium	EN 14348: 1tbl/3l	15 min
Virucidní účinek	Vaccinia, , SV40, adeno, polio	DVV /C: 1tbl/5l	15 min
	Adeno, polio Adeno, polio, MNV	EN 14476: 1tbl/5l EN 14476: 1tbl/3l EN 14476 1tbl/3l	5 min 5 min 1 min

Vysoká biologická zátěž:			
Baktericidní účinek		EN 1276: 2 tbl/5l vody EN 13727: 1tbl/1,5l vody EN 13697: 1tbl/1,5l vody	5 min 5 min 5 min
Fungicidní (kvasinky)	C. albicans	EN 1650 2tbl/5l vody EN 13624: 1 tbl/7,5l vody EN 13697:1tbl/15l	15 min 5min 5 min
Fungicidní (plísně)	Aspergillus brasiliensis	EN 1650: 5tbl/1,5l vody EN 13697. 2tbl/1,5l vody EN 13624:5tbl/1,5l vody	15 min 15 min 15 min
Virucidní	Adeno, polio Vaccinia, SV40,	DVV 1tbl/1l vody	15 min
	Adeno,Vaccinia, SV40,	DVV 1tbl/2lvody	15 min
	Polio	EN 14476 1tbl/2l vody	30 min
	MNV	EN 14476 1tbl/1,5l vody	1 min
TBC, mykobakterie	M. terrae, M. avium	EN 14348: 1tbl/1,5l vody	15 min
Spory: EN13704	Clostridium difficile B. subtilis	1 tableta / 1,5 l vody 5 tablet /1,5l vody	10 min 10 min

Doba minimální trvanlivosti: 24 měsíců

Skladování: skladovat v originálním balení při teplotě 0°C až +25°C odděleně od kyselin. Odděleně od potravin. PE obaly je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených. [Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.](#)

Balení: dóza s obsahem 300 tablet baleno v kartonu po 6 kusech

Distributor: ECOLAB s.r.o., VOCTÁŘOVA 2449/5, 180 00 PRAHA 8, CZECH REPUBLIC