

AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ A VYSOCE EFEKTIVNÍ DEZINFEKCE

Sekusept™ aktiv

Dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové s vynikajícím čisticím účinkem

Sekusept aktiv kombinuje aktivní čištění s účinnou dezinfekcí a vynikající materiálovou kompatibilitou v jediném produktu, své nejlepší vlastnosti nabízí jak pro ochranu zdravotníků, pacientů, tak i pro čištěné nástroje a pomůcky.

Sekusept aktiv je výjimečný díky následujícím vlastnostem:

- ▲ Působí rychle
- ▲ Je hospodárný
- ▲ Je velmi praktický



Sekusept™ aktiv

Dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové s vynikajícím čisticím účinkem

Proč používat Sekusept aktiv?

ČIŠTĚNÍ

Sekusept aktiv byl vyvinut s cílem dosáhnout nejlepších možných výsledků čištění. Jeho vynikající čisticí účinky jsou potvrzeny nezávislými hygienickými institucemi.

DEZINFEKCE

Inovativní složení přípravku ve formě bezprašného mikrogranulátu představuje mimořádně účinný systém založený na aktivním kyslíku a kyselině peroctové. Výsledkem je vysoká činnost (baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní - kvasinky, virucidní a sporicidní) ve velmi krátké době.

VŠESTRANNÁ POUŽITELNOST

Se svým čisticím výkonem a širokým spektrem účinnosti je Sekusept aktiv možno použít pro všechny kroky ručního ošetřování nástrojů. Nabízí přitom ověřenou materiálovou kompatibilitu napomáhající dosažení dlouhé životnosti nástrojů.













KONCEPCE PEROXYBALANCE™

Dlouholetý vývoj receptury optimalizoval hodnotu pH do neutrálního rozsahu,

čímž je zajištěno, že dezinfekční prostředky PerOxyBalance™ jsou dokonale bezpečné jak pro pacienty, zdravotnický personál, tak i ošetřované nástroje, zejména pro endoskopy.


Není vhodný pro nástroje z mosazi a mědi ani pro mechanicky poškozené pochromované nebo poniklované nástroje.



TABULKA DÁVKOVÁNÍ

MNOŽSTVÍ ROZTOKU	KONCENTRACE APLIKAČNÍHO ROZTOKU	
	1%	2%
2 litry	30 ml = 1 x 	60 ml = 2 x 
4 litry	60 ml = 2 x 	120 ml = 4 x 
8 litrů	120 ml = 4 x 	240 ml = 8 x 
10 litrů	150 ml = 1 x 	300 ml = 2 x 
20 litrů	300 ml = 2 x 	600 ml = 4 x 
30 litrů	450 ml = 3 x 	900 ml = 6 x 

100 g mikrogranulátu = 150 ml

 1 malá odměrka = 20 g mikrogranulátu = 30 ml

 1 velká odměrka = 100 g mikrogranulátu = 150 ml

5 x malá  = 1 x velká 

ÚČINNOST A VÝSLEDKY ROZSÁHLÉHO TESTOVÁNÍ	%	ML/L	DOBA PŮSOBENÍ
Dezinfekce nástrojů dle VAH (účinnost baktericidní, proti kvasinkám, tuberkulocidní) EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14563 (čisté & nečisté podmínky)	1	15	60 min
	2	30	5 min
Dezinfekce nástrojů dle VAH (mykobaktericidní) EN 14348, EN 14563 (čisté & nečisté podmínky)	1	15	60 min
	2	30	15 min
Dezinfekce nástrojů dle RKI v případě úředně potvrzeného hromadného výskytu infekčního onemocnění (spektrum účinku A: baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní-kvasinky)	2	30	60 min
EN13704 (sporicidní: B. subtilis)	2	30	15 min
Clostridium difficile	2	30	10 min
EN14476 (virucidní)	1	15	60 min
	2	30	10 min

ECOLAB HYGIENE S.R.O.
Hlinky 118
603 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 543 518 247
www.ecolab.com

**ECOLAB HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH**
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

**ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+41 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

CE 0297

AKTIVNÍ EFEKTIVNÍ SPOLEHLIVÝ

OBLAST POUŽITÍ

Produkt je určen jak pro manuální reprocessing nástrojů, tak i pro finální dezinfekci zdravotnických prostředků. Je vhodný pro ošetření termolabilních materiálů a přístrojů, které nelze ošetřovat v autoklávu, např. flexibilní endoskopy a anestetické vybavení.

PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO ROZTOKU

Do odměřeného množství vody teplé max 30 °C nasypete odměřené množství granulátu a několikrát promíchejte. Po 15 min je roztok připraven k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nástroje ponořte do roztoku tak, aby všechny jejich povrchy byly dokonale smáčeny. Nástroje čistěte podle pokynů výrobce. Po předepsané době působení nástroje vyjměte a opláchněte vodou alespoň v kvalitě pitné vody. Pak vysušte vnější povrchy i vnitřní kanály (např. u endoskopů). Pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce je nutno použít další samostatnou lázeň.

Dle platné legislativy a doporučení Institutu Roberta Kocha (RKI) je nutné připravovat čerstvý pracovní roztok pro každou směnu. V případě viditelné kontaminace připravte čerstvý roztok okamžitě.

SLOŽENÍ

Peruhličtan sodný, neonizující tenzidy, fosforitany.

Aktivní obsah v 2% roztoku pro aktuální použití: > 1000 ppm kyseliny peroctové.

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KS V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Sekusept aktiv 1,5 kg kbelík	4	3050530
Sekusept aktiv 6 kg kbelík	1	3050590
Testovací proužky PEROXYBALANCE	50	3007370

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Signální slovo: Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Upozornění - mírné zbarvení mikrogranulátu nemá žádný vliv na účinnost produktu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2017 / 006 APPR. 2017.11.10.

ECOLAB®

To whom, it concerns:

Statement/ Prohlášení:

As a manufacturer of the medical device we hereby declare the additional claims, not mentioned on the label (in accordance with Council Directive MDD 93/42, Annex I and Guidance company Ecolab on usage of Legal and Marketing Claims). /

Jako výrobce zdravotnického prostředku souhlasíme s použitím dodatečných deklarácí, neuvedených na etiketě (v souladu se směrnicí Rady MDD 93/42, příloha I a směrnicí firmy Ecolab pro používání právních a marketingových deklarácí).

Manufacturer of the medical device below: / Výrobce produktu, uvedeného níže:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
ECOLAB-ALLEE, 140789 MONHEIM, GERMANY

Confirms the correct use of the following declarations, which have not been a part of the current label:/potvrzuje správnost následujících deklarácí, doposud neuvedených na etiketě výrobku:

Name of the product/Název produktu: **SEKUSEPT AKTIV**

Risk class:/Třída nebezpečnosti: **II.b**

Efficacy against:/Účinnost proti	Test methods	Conditions/Biologická zátěž	Concentration /koncentrace	Exposure time/čas expozice
fungicidal/ fungicidní (Aspergillus brasiliensis)	EN 13624	clean/nížší	2% / 30ml/l	15 min
		dirty/vyšší	2% / 30 ml/l	30 min
Virucidal/ virucidní	DVV 2008	dirty / vyšší	1% / 15 ml/l	30 min

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razítko a podpis výrobce:

i.A.


Sebastian Niebur

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 10 02 62
40766 Monheim am Rhein

i.V.


Dr. Bernhard Meyer